

アダプト外周シール

一般情報

- 面板の外周部に容易にフィットします
- 面板辺縁部が浮くのを防ぎます
- 装着期間の延長が期待できます
- 腹部のしわやくぼみ、凹凸になじみます
- 追従性があり、傍ストーマヘルニアの方にもお使いいただけます。

使用方法

1. 面板を剥離し、ストーマ周囲の皮膚を清潔で乾いた状態にします。新しい面板を装着します。
2. アダプト外周シールの辺縁部をそれぞれ軽く引っ張り、はくり紙を片側のみ剥がします。
3. アダプト外周シールを、面板と皮膚の両方を覆うように面板外周に貼り付けます。アダプト外周シールを指で押しながらしっかりと密着させます。
4. 面板周囲にさらにアダプト外周シールを貼り付ける場合は、同じ手順を繰り返します。
5. アダプト外周シールは、装具交換と同じタイミングで交換します。



1



2



3



4



5



6

よくある質問

ホルスターのテープ付装具と併用することはできますか？

はい。併用可能です。

この製品を使用すると、面板をしっかり腹壁に固定することができますか？

はい。本製品は面板の固定と辺縁部の浮き防止に役立ちます。漏れがある場合は、皮膚・排泄ケア認定看護師や医療従事者にご相談ください。

アダプト外周シールにラテックスは含まれていますか？

いいえ。本製品にはハイドロコロイド材およびポリマー/コポリマー樹脂が使用されています。天然ゴムは使用されていません。

パッケージはリサイクル可能ですか？

はい。ホルスターでは、地球の限られた資源を大切にすることで環境への配慮に努めています。使われているプラスチックパッケージはリサイクル可能です。

アダプト外周シールを、1枚や2枚だけなど3枚未満で使用することは可能ですか？

はい。可能です。必要に応じた枚数を必要な場所だけご使用いただけます。詳細は、皮膚・排泄ケア認定看護師または医療従事者にご相談ください。

ストーマケアに関するヒント

アダプト外周シール



製品番号: 79402 - 30 個入り

その他の説明:

医療従事者による定期的なフォローアップをお勧めします。

製品のお問い合わせやご注文に際しては、品名、製品番号、規格などをお知らせください。

製品は直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。

ご使用に際しては使用説明書をよく読み、正しくお使いください。

装具を選択する際は、医療従事者にご相談ください。

CE すべての製品にCEマークが付いているわけではありません。

Hollister のロゴ、Adaptおよび「健康な肌から、より良い毎日を支える。」は Hollister Incorporated の商標です。

© 2020 Hollister Incorporated.

Hollister Incorporated
〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-8
スフィアタワー天王洲21階
株式会社ホリスター

www.hollister.com