


アダプト皮膚保護凸面リング

一般情報

- さまざまな形状の腹壁に対応します。
- 円形およびオーバル(楕円形)からお選びいただけます。
- しわやくぼみに追従し、面板の下に便が潜り込むのを防ぎます。
- 面板と併用して浅い凸面を作ることができます。
- 陥凹型ストーマの方や柔らかい凸面を使用したい方に

使用方法

1. 皮膚を洗浄し、清潔で乾いた状態にします。
2. 皮膚保護凸面リングの両側からフィルムを取り外します(図3)
3. 以下を選択できます:
 - 皮膚保護凸面リングの平坦な側を面板側に装着し、次に面板を装着します(図4、5)
 - 皮膚保護凸面リングの凸面側を皮膚に密着させ、次に面板を装着します。
4. 皮膚保護凸面リングを取り外すには、面板交換時に皮膚からリングを静かに剥がします。

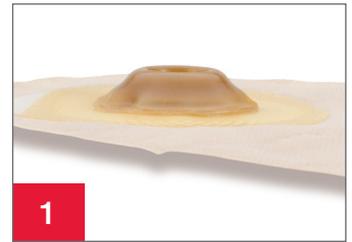

1

面板と併用することで、凸面を作ることができます。



2



3

フィルムを剥離します。



4

凸面リングを面板の上に置きます。



5

面板を貼付します。

よくある質問

使用するアダプト皮膚保護凸面リング(以下、凸面リング)のサイズおよび形状は、どのようにして決めればよいですか?

ストーマのサイズと形状に最も近い凸面リングのサイズと形状を選択します。ストーマに個別に適合させるため、凸面リングは任意の方向に少し伸ばすことができます。伸ばしすぎないでください。

凸面リングがストーマに比べて大きすぎる場合はどうしたらよいですか?

凸面リングの一部を切って切り口を押し付け、凸面リングを小さくします。

皮膚保護凸面リングのどちら側を使用するかは重要ですか?

はい。凸面リングの平面側を面板側に使用し、皮膚側に凸面側を装着してください。

皮膚に炎症がある場合、保護リングを使用できますか?

皮膚に炎症などの異常がある場合には、医療従事者にご相談の上、慎重な使用をお勧めします。

